


Programa de Apoyo Diagnóstico para Profesionales de la Salud



Para solicitar su ADAMTS 13 escanee el código QR o ingrese a **ID-RD.com**

También puede solicitarlo enviando un mail a:
gestionlaboratorios@serproen.cl

AstraZeneca 

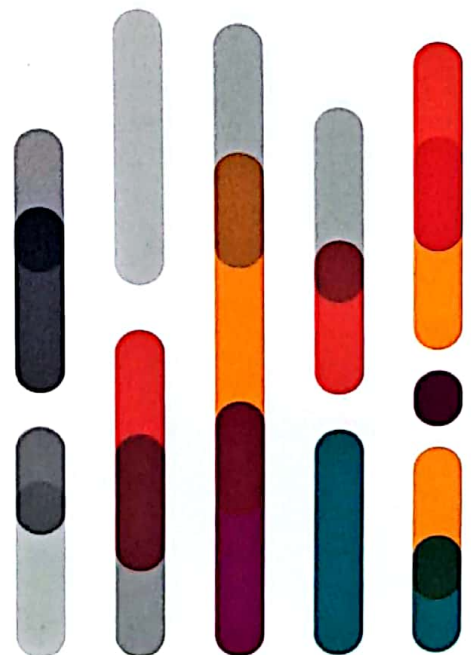

Instructivo para toma de muestra de ADAMTS 13



Recomendaciones

Indicaciones para el paciente: Ayuno 4 hs, o desayuno liviano.

El paciente no debe haber iniciado tratamiento con corticoides, transfusiones, tratamientos monoclonales o plasmaféresis al momento de la toma de la muestra.



Indicaciones de la muestra

Laboratorio de procesamiento: Red de Salud UC CHRISTUS, Santiago.

Tipo de muestra requerida: Sangre periférica.

Tipo de tubo requerido: tubo tapa color celeste.

Volumen requerido: 2.7 ml de sangre total.

Estabilidad de la muestra: T° ambiente (20-25°C) 4 hrs

Plazo entrega resultados: 24 a 48 horas.

Rotulación de la muestra:

Nombre completo del paciente + Rut del paciente o número de identificación, según corresponda

Material exclusivo para profesionales de la salud. Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos o desea reportar un evento adverso, ingrese en contactazmedical.astrazeneca.com ©2023 AstraZeneca, Chile. Isidora Goyenechea N° 3477, piso 2, Las Condes, Santiago.